

Anwendung Nasenpopeltest COVID-19 Antigen Schnelltest (kolloidales Gold) von Anbio Biontech

Vorgehensweise:

Ihr Kind führt das lange „Wattestäbchen“ bis zu 2,5 cm zuerst in sein rechtes und danach in sein linkes Nasenloch ein. Dabei soll es den Wattestäbchen jeweils 5 x entlang der Schleimhaut rollen, damit Schleim als auch Zellen gesammelt werden können.

Danach wird das Wattestäbchen in das Fläschchen mit dem lilafarbenen Deckel gesteckt. Dazu „quetscht“ ihr Kind das Fläschchen unten mit zwei Fingern zusammen während es mit der anderen Hand das Wattestäbchen dreht. Damit geht aus der Watte das aus der Nase aufgenommene Material in die Flüssigkeit über.

Ihr Kind zieht das Wattestäbchen so aus dem Fläschchen, dass es dieses unten weiterhin zusammendrückt, damit möglichst wenig Flüssigkeit mitgenommen wird.

Nach dem Verschließen des Röhrchens werden 3 Tropfen auf die Stelle „S“ aufgebracht.

Nach kurzer Zeit erscheint bei negativem Ergebnis bei „C“ ein Strich. → Kind darf in die Schule

Positiv getestet ist das Kind, wenn bei „C“ und „T“ Striche zu sehen sind. → PCR-Test notwendig

Ungültig ist der Test, wenn nichts oder nur bei „T“ ein Strich erscheint. → Wiederholung